



Osmocol® Hydrocolloid Dressing (Sacral) adalah balutan luka yang sebagian besar terbuat dari carboxymethylcellulose (CMC) dan dilapisi film polyurethane yang tahan air dan mikroba, serta bersifat occlusive, dengan bentuk yang dirancang sesuai dengan bentuk sakrum. Osmocol® Hydrocolloid Dressing (Sacral) menghasilkan gel yang biodegradable saat bersentuhan dengan luka, sehingga memberikan kelembapan pada luka untuk mendukung kondisi pemulihan yang optimal. Dikemas secara individual, siap digunakan, dan disterilisasikan dengan gas ETO.

PETUNJUK UMUM

- Pasien yang menjalani terapi kompresi untuk ulkus vena kaki dapat melakukan kompresi sembari menggunakan Osmocol® Hydrocolloid Dressing.
- Belum ada laporan adanya efek samping terhadap bahan dari Osmocol® Hydrocolloid Dressing.

PENGGANTIAN BALUTAN

- Waktu penggantian balutan disesuaikan dengan tahap pemulihan luka dan jumlah eksudat, dengan durasi penggunaan maksimal 7 hari.
- Balutan sebaiknya diganti bila balutan sudah sepenuhnya berubah menjadi gel.

INDIKASI

Osmocol® Hydrocolloid Dressing (Sacral) diindikasikan sebagai balutan primer untuk perawatan luka superfisial bereksudat rendah-sedang pada bagian sakrum, seperti:


- Luka tekan
- Ulkus
- Luka bakar derajat 2
- Luka post-operasi

KONTRAINDIKASI

- Tidak boleh digunakan pada luka infeksi.
- Tidak dianjurkan pada pasien yang alergi terhadap bahan balutan.



1. Bersihkan bidang luka secara menyeluruh sesuai tata laksana yang ada hingga bersih dan kering

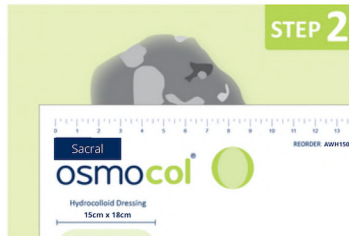

2. Tentukan ukuran balutan yang sesuai dengan melebihi 2-3 cm dari luas luka




3. Hangatkan balutan dengan mengusap beberapa kali untuk mengaktifkan lapisan perekat sebelum membuka kemasan



4. Lepaskan lapisan belakang dan aplikasikan balutan tanpa menyentuh bagian tengah balutan yang adhesif. Lipat balutan menjadi dua. Pisahkan kedua bokong dan aplikasikan balutan hingga menutupi bagian tulang ekor.



5. Lepaskan lapisan transparan lainnya.

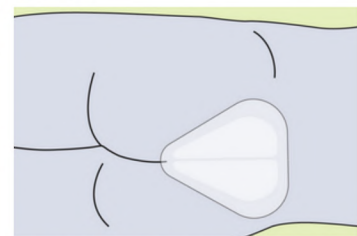

6. Luruskan balutan sesuai kontur luka dan berikan tekanan secara lembut untuk memastikan perekatan.