


INDIKASI


AsGUARD[®] Flex Non-Woven Roll diindikasikan untuk fiksasi balutan primer atau alat medis, seperti selang, kateter, dan sebagainya.

KONTRAINDIKASI


Tidak dianjurkan pada pasien yang alergi dengan bahan plester

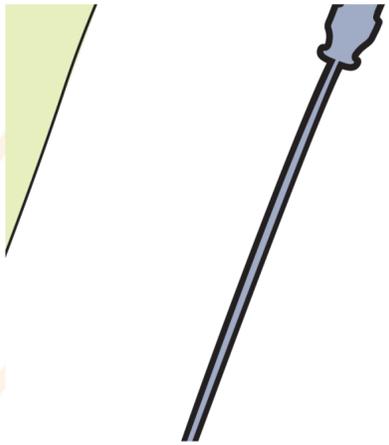

STEP 1

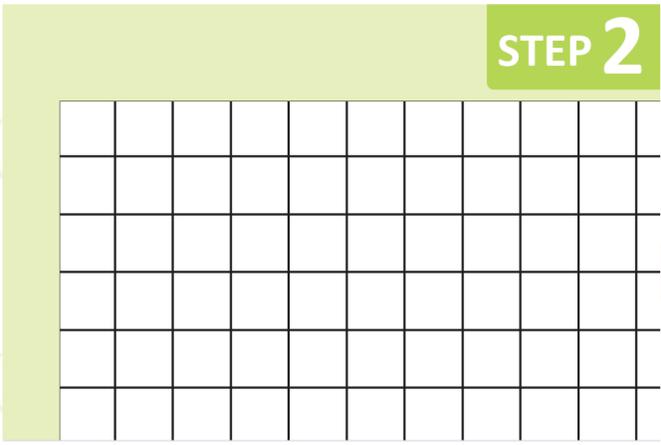

STEP 2

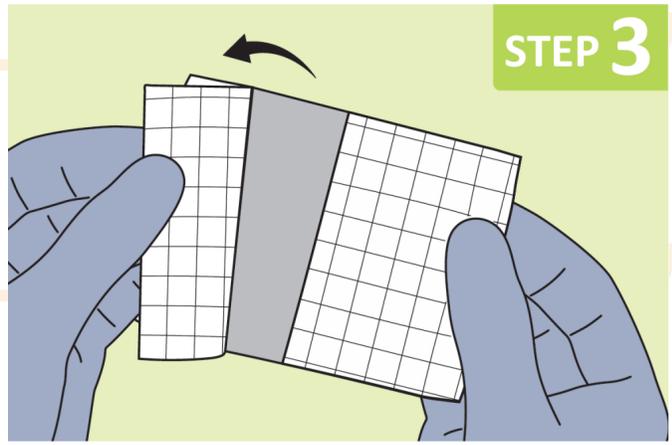


STEP 3


1. Pastikan daerah kulit yang ingin dibalut sudah bersih dan kering. Gunakan balutan primer yang sesuai sebelum menggunakan AsGuard[®] Flex Non-Woven Roll.

2. Tentukan panjang dan lebar plester yang diperlukan sesuai dengan balutan atau alat medis yang ingin difiksasi. Gunakan marka pengukuran panjang dan lebihkan 2-3 cm dari daerah yang ingin dibalut.


3. Potong plester sesuai panjang yang diperlukan. Pisahkan bagian belakang plester (penggaris ukuran) dari AsGuard[®] Flex Non-Woven Roll.

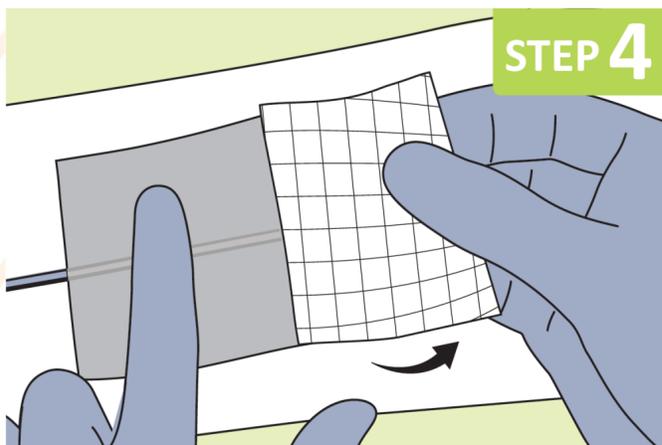

STEP 4

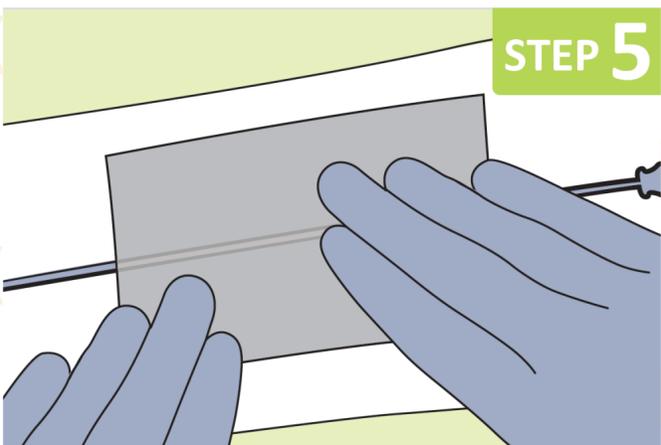

STEP 5

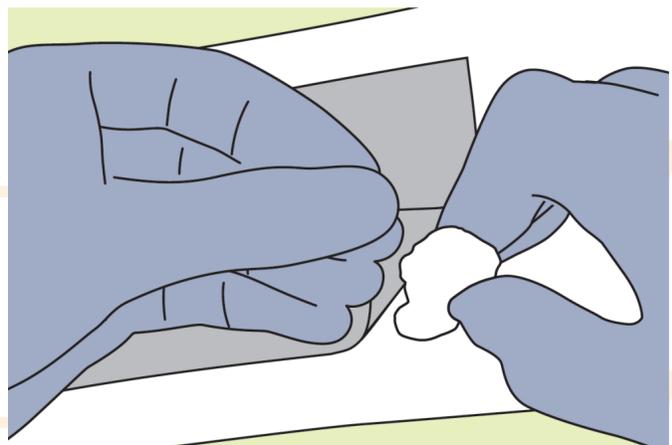

4. Aplikasikan plester dengan menutupi seluruh bagian alat medis yang ingin difiksasi.

5. Lepaskan lapisan penopang plester dan sesuaikan dengan kontur kulit atau alat medis sehingga plester melekat dengan aman dan nyaman.

6. Plester dapat dilepaskan dengan metode "Renggang dan Lepas" untuk menjaga integritas kulit di sekitarnya.