


Bersihkan luka secara menyeluruh sesuai tatalaksana yang ada. Pastikan kulit di sekeliling luka bersih dan kering.



Pemilihan ukuran film bergantung pada luas luka. Gunakan garis pengukuran panjang dan lebihkan 1-2 cm dari luas luka tersebut.

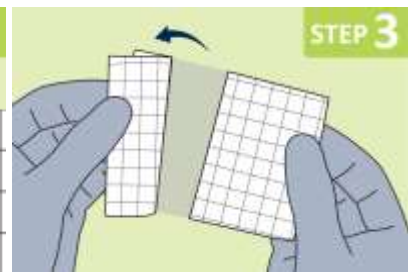


Potong film sesuai panjang yang diperlukan. Pisahkan bagian belakang film (penggaris ukuran) dari AsGUARD® Clear Film Roll



Aplikasikan film dengan menutupi seluruh luka. Eratkan dengan pemberian tekanan pada pinggir film.



Lepaskan lapisan penopang dan sesuaikan dengan kontur kulit untuk menghasilkan balutan yang tahan air dan aman.

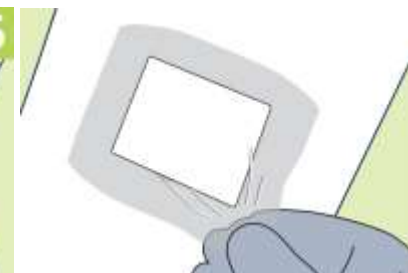

**PENGGANTIAN BALUTAN**

Perawat menentukan waktu penggantian balutan sesuai dengan tahap pemulihan luka dan kadar eksudat.

**INDIKASI**

AsGUARD® Clear Film Roll diindikasikan untuk fiksasi balutan primer dan melindungi dari air dan mikroba pada kasus:

- Kulit robek minor
- Abrasi dan laserasi kulit
- Kulit melepuh

**KONTRAINDIKASI**

- Tidak digunakan bila terdapat alergi terhadap komponen dressing.

Waktu pemakaian dressing disarankan maksimum 7 hari.

Untuk mengurangi kerusakan pada kulit rapuh, lepaskan dressing dengan metode "Stretch and Release".