




PETUNJUK PENGGUNAAN MAGNUM™ BIOPSY GUN INSTRUMENT

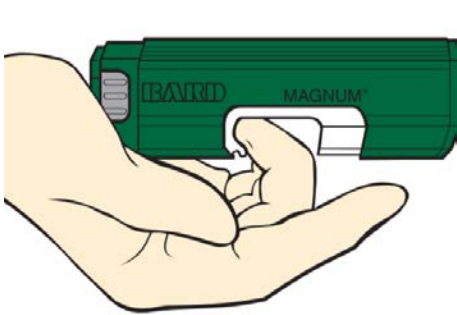

1. Pegang biopsy gun dengan satu jari tangan dominan

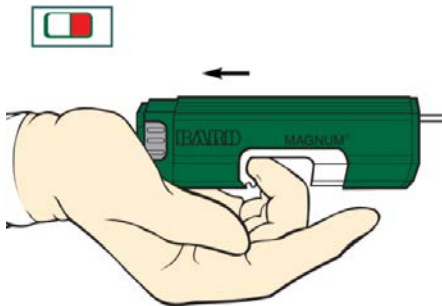


2. Kokang sekali sehingga indikator menjadi putih-merah

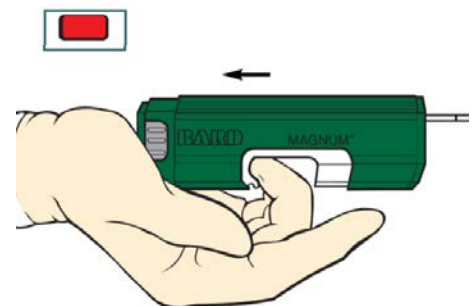


3. Kokang sekali lagi sehingga indikator menjadi merah




4. Pilih kedalaman penetrasi yang sesuai (15 atau 22 mm)

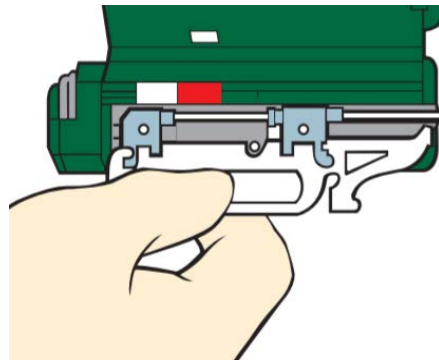

5. Masukkan jarum biopsi dengan ukuran yang sesuai

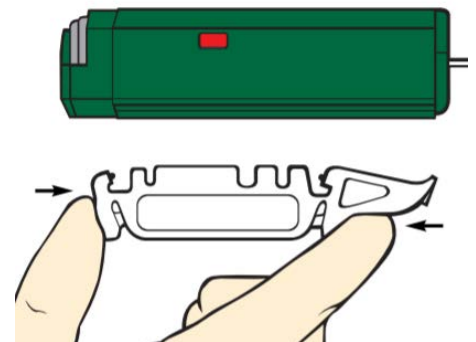


6. Lepaskan spacer dan tutup biopsy gun

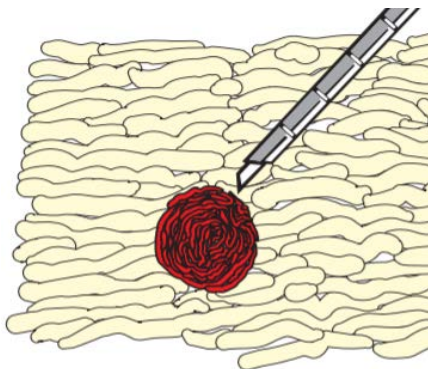

7. Siapkan lokasi masuknya jarum biopsi



8. Buka kunci pengaman dari S (Safety) ke F (Fine)

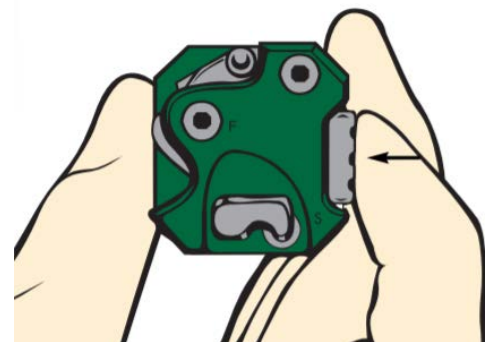

9. Pencet "Trigger" untuk penetrasi jaringan (otomatis)



10. Kokang sekali untuk mengambil sampel