




STEP 1

Bersihkan luka secara menyeluruh, menggunakan protokol lokal. Kulit di sekitar luka harus bersih dan kering.

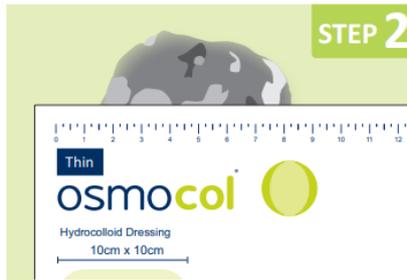

STEP 2

Ukuran balutan tergantung pada area permukaan luka – tepi pembalut harus dilebihkan 2 – 3 cm dari luka.



STEP 3

Sementara balutan Osmocol® Hydrocolloid tetap berada dalam kemasan, hangatkan dengan lembut di antara kedua tangan, untuk mengaktifkan permukaan perekat.



STEP 4

Buka dan keluarkan kertas pendukung dari permukaan balutan tanpa menyentuh bagian tengah, aplikasikan balutan Osmocol® Hydrocolloid di atas luka.



STEP 5

Lepaskan lapisan film bening yang tersisa setelah balutan berada tepat di atas luka.



STEP 6

Tekan dengan lembut balutan (bagian tepi) untuk memastikan pemasangan sudah benar

### INDIKASI DAN INFORMASI UMUM

Osmocol® Hydrocolloid Dressing dapat digunakan sebagai Primary Dressing dan Secondary Dressing untuk luka dengan eksudat ringan sampai sedang.

Digunakan untuk pencegahan:

- Kerusakan kulit Superficial
- Surgical sites
- Pressure Injuries
- Arterial Ulcers
- Venous Leg ulcers
- Diabetic Ulcers

### PENGGANTIAN BALUTAN

Osmocol® Hydrocolloid Dressing harus diganti bila pada lapisan permukaan Hydrocolloid sudah jenuh / buram atau bila terjadi kebocoran dikarenakan adanya eksudat. Untuk luka Nekrotik Osmocol® Hydrocolloid Dressing harus diganti sesering mungkin.

Maksimum pemakaian selama 7 hari.

Untuk melepaskan balutan Osmocol® Hydrocolloid Dressing guna menghindari kerusakan pada kulit, dapat menggunakan teknik “Stretch and Release”.

### ISI

---

Carboxymethyl Cellulosa  
Polyurethane film

### SPESIFIKASI

---

Warna : Transparan / Beige  
Sterilisasi : Gamma Radiasi  
Lain – lain : Latex Free (Bebas Latex)  
DEHP Free (Bebas DEHP)  
MRI, CT compatible  
Kadarluarsa : 3 Tahun

### COMPLIANCE STANDARD (Standar Kepatuhan)

---

Kelas : IIB – Steril  
ARTG : 287415  
ISO10993-5 : Biocompatible to Cytotoxicity  
ISO10993-10 : Biocompatible to irritation  
and Skin Sensitization

### PENYIMPANAN

---

Di simpan di tempat bersih, kering di bawah 25°C, dan hindari paparan sinar matahari langsung.

### KEMASAN

---

Tiap Dressing dikemas dalam kantong kertas / film.

### KONTRA INDIKASI

---

Tidak digunakan jika diketahui alergi terhadap kandungan Osmocol® Hydrocolloid Dressing.