

AsGUARD® Clear+ Film Island Dressing adalah balutan luka berbahan serat non-woven dengan bantalan penyerap dan lapisan luar berupa film transparan.

INDIKASI

AsGUARD® Clear+ Film Island Dressing diindikasikan sebagai balutan primer dalam perawatan luka superfisial dengan eksudat minimal-rendah, seperti:


- Kulit robek
- Luka post-operasi (misal: C-Section / SC)
- Abrasi dan laserasi
- Kulit lepuh

KONTRAIKASI

Tidak dianjurkan pada pasien yang alergi dengan bahan balutan

PETUNJUK UMUM

Bila terdapat infeksi pada luka, sebaiknya digunakan balutan primer yang dapat membersihkan luka, seperti Osmonate® Calcium Alginate dan Zorflex® Activated Carbon Cloth Wound Contact Layer, dan dapat dikombinasikan dengan Osmocel® Hydroporous Foam atau IMPERVIA® Neosorb Superabsorbent Dressing.

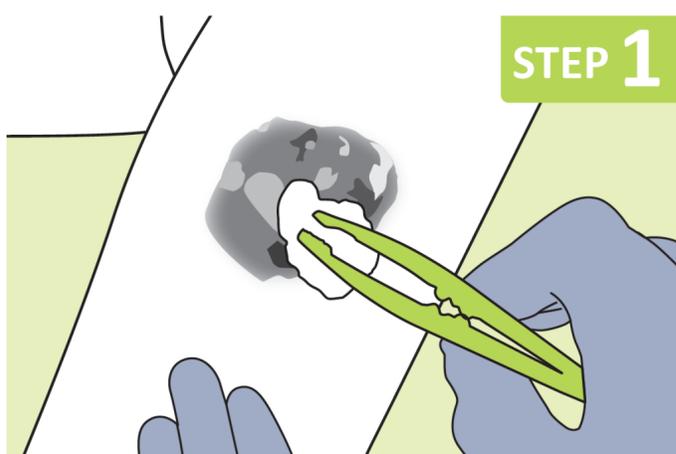


STEP 1

1. Bersihkan bidang luka secara menyeluruh sesuai tata laksana yang ada hingga bersih dan kering




STEP 2

2. Tentukan ukuran balutan yang sesuai dengan melebihi 1-2 cm dari luas luka

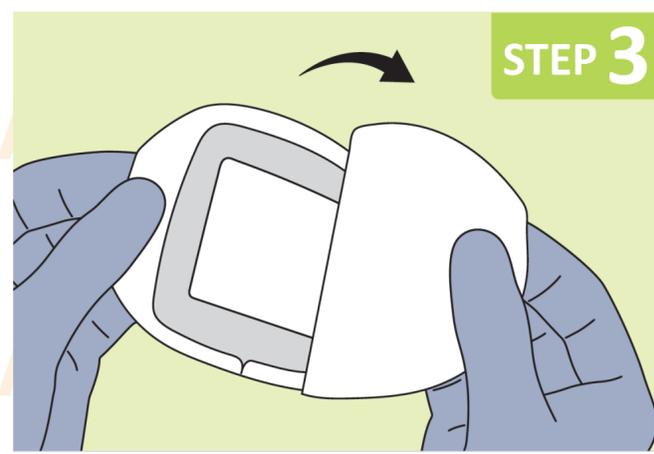


STEP 3

3. Buka bungkus balutan dan lepaskan lapisan belakang

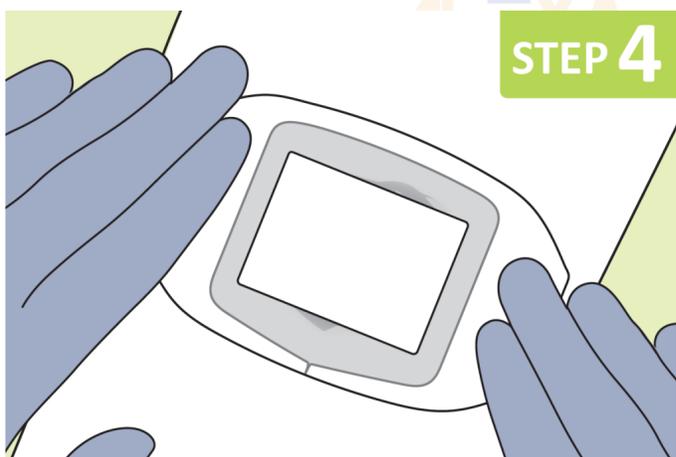


STEP 4

4. Aplikasikan balutan dengan menutupi seluruh bidang luka. Luruskan bagian pinggiran dari balutan

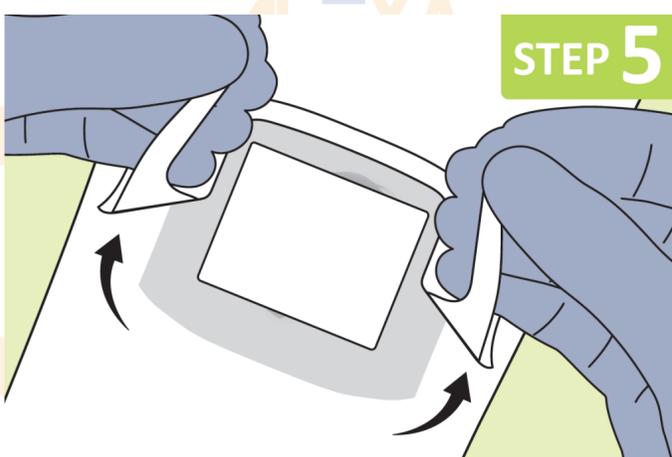

STEP 5

5. Lepaskan lapisan pinggiran dan pastikan balutan melekat dengan aman dan nyaman.

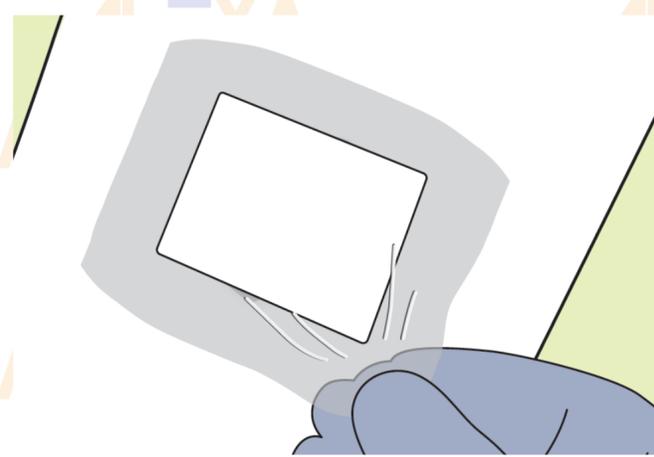

6. Balutan dapat dilepaskan dengan metode "Renggang dan Lepas" untuk mengurangi trauma